

BLUE ETCH

DENTÁLNÍ LEPTACÍ GEL

Pro kyselé leptání skloviny a ionomerického skleněného cementu 38% kyselinou fosforečnou

Konzistence a složení BLUE ETCHING GEL dovoluje přesné a účinné leptání i v relativně nepřístupných místech. Je snadno odstranitelný vodou.

Návod k použití:

1. Před leptáním řádně vyčistěte, opláchněte a vysušte povrch skloviny
2. Nasadte jehlu na stříkačku

3. Aplikujte přímo na povrch zubů a nechte působit 60 sekund
 4. Opláchněte proudem vody po dobu 30 sekund a vysušte
- Pro získání perfektní adheze kompozitního materiálu k leptanému povrchu je důležité, aby leptaný povrch byl zbaven všech druhů znečištění a kontaminace (sliny, krev apod.)

**Výrobce: La Maison Dentaire SA;
FL-9496 Balzers**

Eport a marketing: MEDIREL SA
CH-6982 Agno, Švýcarsko
E mail: info@medirel.ch

CE 0459

Dovoz a distribuce v ČR:

GLAX s.r.o., Malodoubská 502,
460 08 LIBEREC www.glax.eu;
info@glax.eu